

## **IEA Medical Inhalationsgerät JM-06802**

### **Anwendung:**

- Aufladen: Gerät anschließen und vollständig aufladen (grünes Licht zeigt Ladevorgang abgeschlossen).
- Vorbereitung: Wasserbehälter einbauen, zu 2/3 füllen und schließen. Maske befestigen.
- Betrieb: An/Aus-Taste drücken, LED leuchtet blau. Mit erneutem Drücken Sprühleistung ändern; drittes Drücken schaltet das Gerät aus.
- Maske nutzen: Über Nase und Mund legen bis der Dampf endet, Kondenswasser abwischen.
- Hinweis: Bei keinem Sprühnebel den Wasserstand prüfen und Gerät leicht schütteln.

### **Warnhinweise:**

- Nicht für Kinder unter 3 Jahren ohne ärztlichen Rat.
- Schwangere, Stillende und Asthmatiker sollten vorher einen Arzt konsultieren.
- Nicht in die Mikrowelle legen.
- Haut- oder Augenreizungen sofort ausspülen und Arzt aufsuchen.
- Vorsicht bei körperlicher Schwäche oder bestimmten gesundheitlichen Zuständen; Arzt konsultieren.

### **Kontakt-Hersteller:**

- [sales@szjermei.com](mailto:sales@szjermei.com)

# INHALATIONS- GERÄT NEBULIZER



- USB C** USB-C KABEL  
EN: USB-C CABLE
- 1x** INHALATIONSGERÄT  
EN: INHALATION DEVICE
- 3x** VERSCHIEDENE MUNDSTÜCKE  
EN: DIFFERENT MOUTHPIECES

WE TAKE CARE  
OF YOU  
ALWAYS!

INHALATIONSGERÄT NEBULIZER

