

IEA Green Fieberthermometer AOJ-20A

Anwendungshinweise

- Misst Temperatur an Stirn oder im Ohr (Ohrmodus nur für Kinder über 3 Monate).
- Gerät einschalten, Modus wählen (Stirn oder Ohr), messen durch kurzes Drücken.
- Stirnmessung: 0–3 cm Abstand zur Haut, Ohrmessung: Sonde vorsichtig ins Ohr einsetzen.
- Farbige Anzeige: Grün (normal), Orange (leichtes Fieber), Rot (Fieber).
- Gerät speichert bis zu 40 Messwerte, automatische Abschaltung nach 13 Sekunden.

Sicherheitshinweise

- Nicht für Babys unter 3 Monaten im Ohrmodus geeignet.
- Nicht in Wasser tauchen, nur mit Alkohol reinigen.
- Bei Schäden am Gerät nicht weiterverwenden.
- Nicht bei extremer Kälte oder Hitze messen – mindestens 30 Minuten an Raumtemperatur gewöhnen lassen.
- Kein Ersatz für ärztliche Diagnose – bei Symptomen immer medizinischen Rat einholen.

Kontakt-Hersteller:

- service@aojmedical.com



Anwendungen für das Ohr
Applications for the ear



Anwendung für die Stirn
Application for the forehead



Verwendung für die Oberfläche
Use for the surface



Für Kinder
For children



Für Erwachsene
For adults

Merkmale/Features

- Altersklassifizierung: Modi für 3 Monate bis 6 Jahre, 6 Jahre bis 12 Jahre und über 12 Jahre - für altersgerechte Genauigkeit.
- Automatischer Wechsel: Zwischen Stirn- und Ohrmodus.
- Magnetische Sondenabdeckung: Macht die Nutzung bequemer.
- Großes Display: Zeigt die aktuellen und die vorherigen Messwerte.
- Multifunktional: Misst Ohr-, Stirn-, Raum-, Milch-, Wasser- und Objekttemperatur.
- Speicherplätze: Bis zu 40 Messwerte speicherbar, mit Umschaltung zwischen Stumm- und Signalmodus.
- Fieberwarnung: Akustische und visuelle Signale.
- Einheitenwahl: Umschaltbar zwischen °C und °F.
- Energiesparmodus: Automatische Abschaltung und Stromsparfunktion.
- Age Classification: Modes for 3 months to 6 years, 6 years to 12 years, and above 12 years - for age-appropriate accuracy.
- Automatic Switching: between forehead and ear mode.
- Magnetic Probe Cover: Makes usage more convenient.
- Extra-Large Display: Shows current and previous readings.
- Multifunctional: Measures ear, forehead, room, milk, water, and object temperature.
- Memory Slots: Stores up to 40 readings, with the option to switch between silent mode and signal mode.
- Fever Alert: Acoustic and visual signals.
- Unit Selection: Switchable between °C and °F.
- Energy-Saving Mode: Automatic shut-off and power-saving function.



4 260764 171095

REF
LOT
MD



2025-01

LOT

20A00154



IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61,
81547 München, Deutschland
Web: www.iea-medical.com
Mail: service@iea-medical.com

EC REP

Share Info GmbH
Heerdter Lohweg 83,
40549 Düsseldorf, Germany



Shenzhen AOJ Medical Technology Co., Ltd.
Room 301 & 4F, Block A, Building A,
Jingfa Intelligent Manufacturing Park,
Xiawei Yuan, Gushu Community,
Xixiang Street, Bao'an District,
518126 Shenzhen, CHINA
Email: service@aojmedical.com



(01)16972040111699
(10)20A00154
(11)250118



FSC

www.fsc.org

100%

Packaging

FSC® C158549



0123




RoHS





**DIGITALES
FIEBER-
THERMOMETER**
DIGITAL THERMOMETER

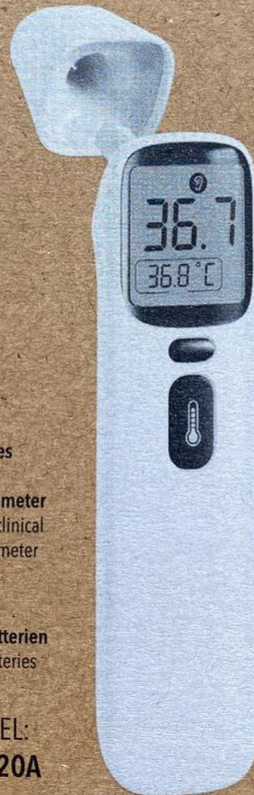

1x
Digitales
Fieber-
thermometer
Digital clinical
thermometer

2x
AAA Batterien
AAA batteries

MODEL:
AOJ-20A






**DIGITALES
FIEBER-
THERMOMETER**
DIGITAL THERMOMETER

PASS



**DIGITALES
FIEBER-
THERMOMETER**
DIGITAL THERMOMETER

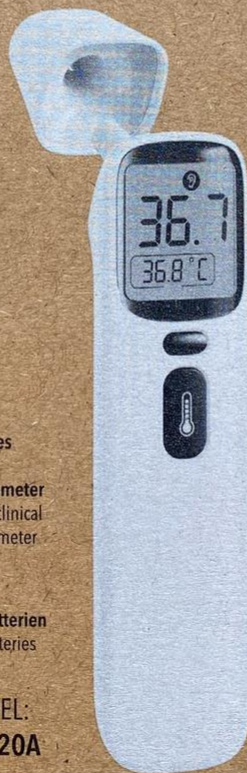

1x
Digitaless
Fieber-
thermometer
Digital clinical
thermometer

2x
AAA Batterien
AAA batteries

MODEL:
AOJ-20A

