

## Sicherheits- und Anwendungshinweise für IEA Medical Insektenstichheiler CH3000A (Batterie)

### Sicherheitshinweise:

- **Nicht geeignet für:** Kinder unter **3 Jahren**, Personen mit **Diabetes**, Hautentzündungen, offenen Wunden oder Fieber.
- **Vorsicht:** Nicht auf Schleimhäuten, Narben oder gereizter Haut anwenden. Maximal **5 Anwendungen pro Stunde** auf derselben Stelle.
- **Batterien:** Nur **AAA-Batterien** verwenden, nicht erhitzen oder ins Feuer werfen. Gerät trocken halten.

### Anwendung:

1. **Vorbereitung:** Haut reinigen, Gerät einschalten (LED grün).
2. **Modus wählen:**
  - **Modus 1 (blau):** 3 Sek. für empfindliche Haut.
  - **Modus 2 (violett):** 6 Sek. für normale Haut.
3. **Anwendung:** Auf die betroffene Stelle setzen, nach Signal entfernen.
4. **Nach der Nutzung:** Reinigen & trocken lagern.

**⚠ Bei starken Reaktionen oder anhaltenden Symptomen Arzt aufsuchen!**

**Kontakt Hersteller:** [service@e-caretalk.com](mailto:service@e-caretalk.com)



**IEA International Trading GmbH**

Grünwalder Straße 61,  
81547 München, Deutschland  
Web: [www.iaa-medical.com](http://www.iaa-medical.com)  
Mail: [service@iaa-medical.com](mailto:service@iaa-medical.com)



**Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)**

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany  
Tel: 0049-40-2513175  
Fax: 0049-40-255726



**Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.**



Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng  
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108  
Nanshan District, Shenzhen P.R. China.  
Tel: 0086-755-27652316  
E-mail: [service@e-caretalk.com](mailto:service@e-caretalk.com)





REF 0591  
MD

**MADE IN PRC**

ANWENDUNG/APPLICATION:

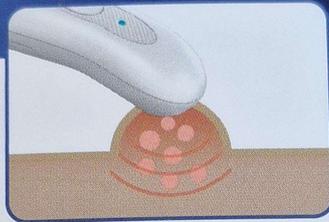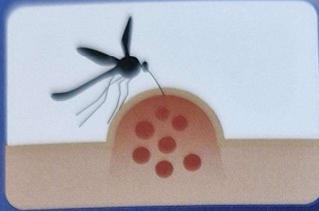

**Schmerzlinderung  
nach dem Insektenstich**  
Pain relief after insect bites

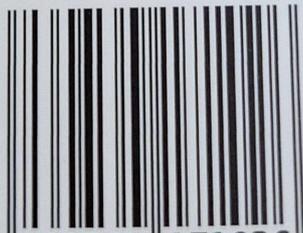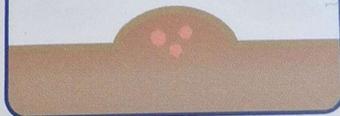

4 260764 171026



(01)06926408711239  
(11)241209  
(10)24100028

WE TAKE CARE  
OF YOU.  
ALWAYS!



# BITE GONE INSEKTENSTICHHEILER BITE GONE INSECT BITE HEALER

SCHNELL  
UND WIRKSAM  
BEI INSEKTEN-  
STICHEN



 **FREI VON CHEMISCHEN STOFFEN**  
EN: FREE FROM CHEMICAL SUBSTANCES

 **HANDLICHES DESIGN**  
EN: SMALL & PORTABLE

 **VORHEIZPHASE**  
EN: PREHEATING

**CE** 0598

IP22

Model:  
CH3000

# BITE GONE INSEKTEN- STICHHEILER

## BITE GONE INSECT BITE HEALER



EINSCHALTEN  
UND AKTIVIEREN  
SWITCH ON  
AND ACTIVATION

Modus 1



Modus 2



### INHALT /CONTENT

1x Bite Gone Insektenstichheiler  
EN: 1x Bite Gone Insect bite healer

1x Gebrauchsanweisung  
EN: 1x Instruction manual

2x Batterien AAA (Inklusive)  
EN: 2x AAA batteries (Included)

### Betriebsbedingungen:

10°C bis 40°C, RH (Relative Luftfeuchtigkeit) 30% - 75%; 700hPa-1060hPa  
Lagerbedingungen: -10°C bis 55°C, RH (Relative Luftfeuchtigkeit) 10% - 90%; 700hPa-1060hPa

### Operating conditions:

10°C to 40°C, RH (Relative Humidity) 30% - 75%; 700hPa-1060hPa  
Storage conditions: -10°C to 55°C, RH (Relative Humidity) 10% - 90%; 700hPa-1060hPa

### Maximale Temperatur: 51°C ± 2°C

Programm 1: 3 Sekunden / 51°C (LED leuchtet blau)  
Programm 2: 6 Sekunden / 51°C (LED leuchtet lila)

WE TAKE CARE  
OF YOU.  
ALWAYS!



**BITE GONE**  
**INSEKTENSTICHHEILER**  
**BITE GONE INSECT BITE HEALER**

**BITE GONE**  
**INSEKTENSTICHHEILER**  
**BITE GONE INSECT BITE HEALER**

WE TAKE CARE  
OF YOU.  
ALWAYS!

