

Sicherheits- und Anwendungshinweise für die Kalt-Warm-Kompresse

Die Hinweise gelten für alle Produktgrößen und Varianten

1. Kälteanwendung:

- Die Kompresse für etwa 2 Stunden in den Gefrierschrank legen.
- Die gekühlte Kompresse in kurzen Abständen (max. 20 Minuten) anwenden, um eine optimale Schmerzlinderung zu erzielen.



2. Wärmeanwendung:

- Die Kompresse für 5–10 Minuten in fast kochendem Wasser oder 30 Sekunden in der Mikrowelle (600 Watt) erwärmen.
- Anschließend durchkneten, damit sich die Wärme gleichmäßig verteilt.

3. Sicherheitsvorkehrungen:

- Immer eine Schutzlage zwischen Kompresse und Haut legen, um Verbrennungen oder Erfrierungen zu vermeiden.
- Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

Kontakt Hersteller: info@intco.com

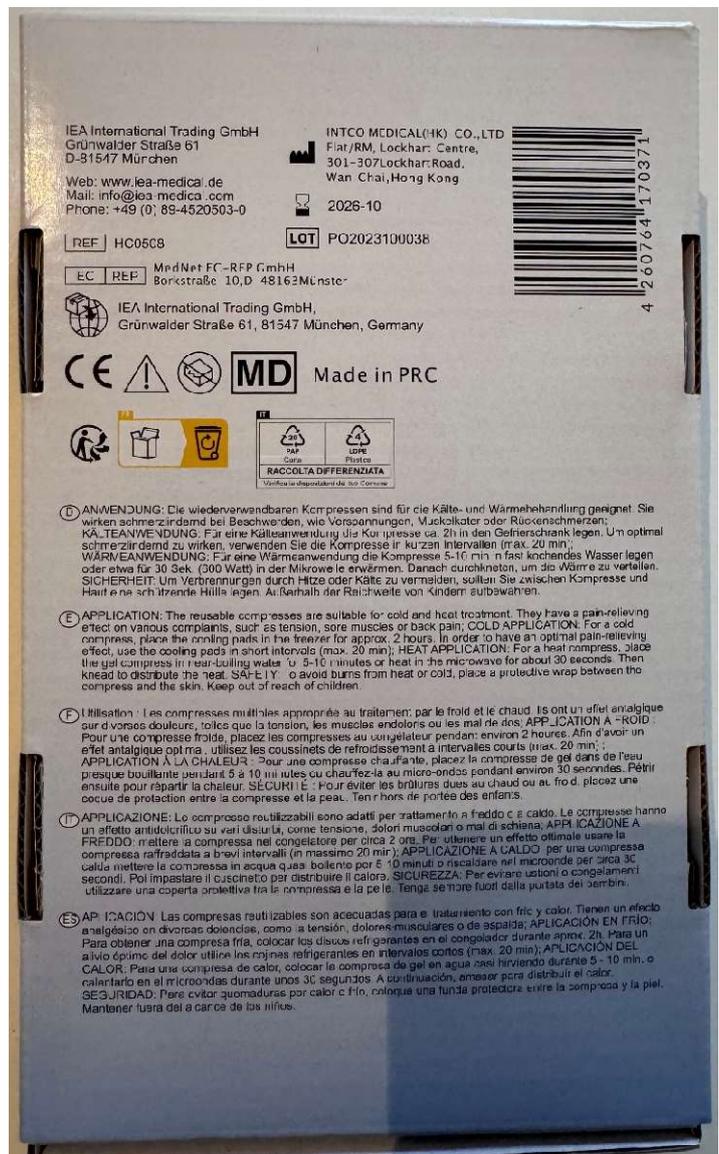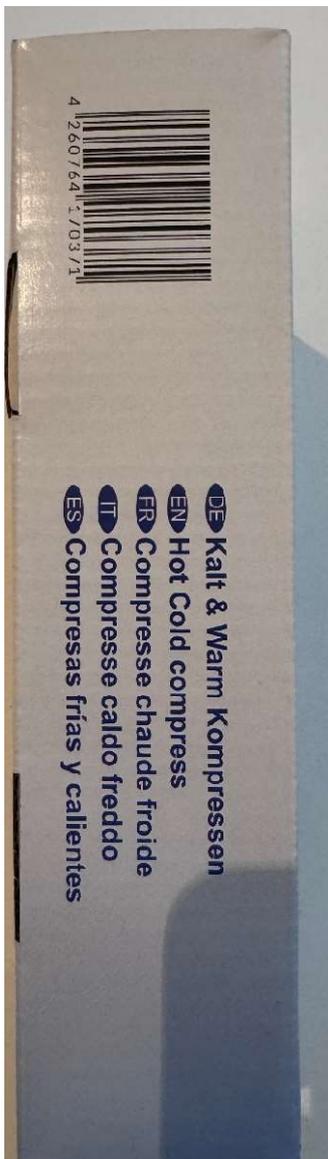

DE Kalt & Warm Kompressen
Wiederverwendbare Gelkissen als Kalt-
oder Werm Auflage



EN Hot Cold compress
Reusable gel pads as a cold or warm pad

FR Compresse chaude froide
Coussinets de gel réutilisables comme
coussinet froid ou chaud

IT Compresse caldo freddo
Cuscinetti riutilizzabili di gel come
compressa calda o fredda

ES Compresas frías y calientes
Almohadillas de gel reutilizables como
compresas fría o calientes



3x
12x20cm

