

## **IEA Medical Lanzetten**

### **(Für alle Verpackungsgrößen)**

#### **Anwendung:**

- Vorbereitung: Lanzette in die Stechhilfe einsetzen und sicher fixieren.
- Stechen: Stechhilfe an der Fingerspitze ansetzen und den Auslöseknopf betätigen, um Blut zu entnehmen.
- Nach der Nutzung: Lanzette vorsichtig aus der Stechhilfe entfernen und sofort entsorgen.

#### **Warnhinweise:**

- Lanzetten sind für den Einmalgebrauch bestimmt; nicht wiederverwenden.
- Nicht mit anderen Personen teilen, um Infektionen zu vermeiden.
- Gebrauchte Lanzetten sicher entsorgen, um Verletzungen zu verhindern.
- Von Kindern fernhalten, um Missbrauch oder versehentliche Verletzungen zu vermeiden.

#### **Kontakt-Hersteller:**

- [sales01@skoba.com.cn](mailto:sales01@skoba.com.cn)



**LANZETTEN**  
**LANCETS**

**50**

STÜCK/PIECES



# LANZETTEN

50 Stück



**STERIL**  
EN: STERILE



**EINZELN VERSIEGELT**  
EN: INDIVIDUALLY SEALED



**SANFTE ANWENDUNG**  
EN: GENTLE APPLICATION



**HYGIENISCHE EINWEGNUTZUNG**  
EN: HYGIENIC DISPOSABLE USE



**EINFACHE HANDHABUNG**  
EN: EASY HANDLING



**PRÄZISE BLUTPROBENENTNAHME**  
EN: PRECISE BLOOD SAMPLING



(01)04260764170883  
(11)230703  
(17)280630  
(10)230750

REF

STERILE R

LOT 230750

 2023.07.03

MD

 2028.06.30



WARNING!



4 260764 170883



# LANZETTEN

50 Stück



**IEA International Trading GmbH**

Grünwalder Straße 61,  
81547 München, Deutschland

Web: [www.iea-medical.com](http://www.iea-medical.com)  
Mail: [service@iea-medical.com](mailto:service@iea-medical.com)



**MedPath GmbH**

Mies-van-der-Rohe-Straße 8  
80807 München, Deutschland



**Tianjin Huashang Medical Equipment Co., Ltd**  
East 1F, C-10 Building, No. 80 HaiYun Street,  
TEDA, 300457 Tianjin, P.R. China.