

IEA Medical Insektenstichheiler und Tasche

Warnhinweise

- Der Insektenstichheiler ist nur für die äußere Anwendung bestimmt. Nicht auf offene Wunden oder Schleimhäute anwenden.
- Bei bekannten Allergien gegen einen der Inhaltsstoffe des Insektenstichheilers nicht verwenden.
- Bei auftretenden Hautreizungen, Rötungen oder anderen allergischen Reaktionen die Anwendung sofort stoppen und einen Arzt konsultieren.
- Den Insektenstichheiler außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Direkten Kontakt mit den Augen vermeiden. Sollten die Augen mit dem Produkt in Kontakt kommen, sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt aufsuchen.
- Lagern Sie das Produkt nicht bei extremen Temperaturen und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung.

Verwendungshinweise

- Vor der Anwendung die Haut an der betroffenen Stelle reinigen und trocknen.
- Den Insektenstichheiler gemäß den Anweisungen auf der Verpackung auf die betroffene Stelle auftragen.
- Den Vorgang bei Bedarf mehrmals täglich wiederholen, jedoch nicht öfter als angegeben.
- Die Tasche ist dafür vorgesehen, den Insektenstichheiler sicher aufzubewahren und zu transportieren. Sie sollte regelmäßig gereinigt werden.
- Nach jedem Gebrauch den Insektenstichheiler sicher verschließen und wieder in die Tasche legen.
- Die Tasche nicht mit scharfen Gegenständen in Kontakt bringen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Kontakt Hersteller:

- Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.
- E-mail: service@e-caretalk.com



WE TAKE CARE
OF YOU,
ALWAYS!

**BITE GONE
INSEKTENSTICHHEILER
BITE GONE INSECT BITE HEALER**

WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!



BITE GONE INSEKTENSTICHHEILER

BITE GONE INSECT BITE HEALER

SCHNELL
UND WIRKSAM
BEI INSEKTEN-
STICHEN



FREI VON CHEMISCHEN STOFFEN
EN: FREE FROM CHEMICAL SUBSTANCES



HANDLICHES DESIGN
EN: SMALL & PORTABLE



VORHEIZPHASE
EN: PREHEATING

CE 0598

IP22

Model:
CH3000




IEA International Trading GmbH
 Grünwalder Straße 61,
 81547 München, Deutschland
 Web: www.iea-medical.com
 Mail: service@iea-medical.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
 Eiffelstrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
 Tel: 0049-40-2513175
 Fax: 0049-40-255726



Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.
 Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng
 Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108
 Nanshan District, Shenzhen P.R. China.
 Tel: 0086-755-27652316
 E-mail: service@e-caretalk.com

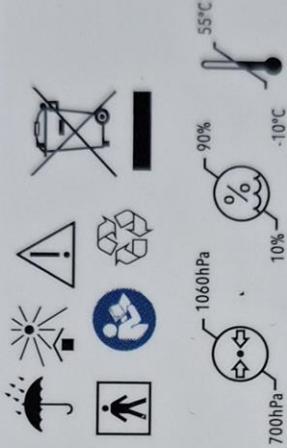

REF 0592
MD

MADE IN PRC





WE TAKE CARE
OF YOU.
ALWAYS!

**BITE GONE
INSEKTENSTICHHEILER
BITE GONE INSECT BITE HEALER**



ANWENDUNG/APPLICATION:

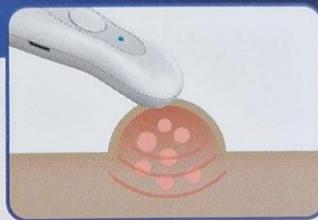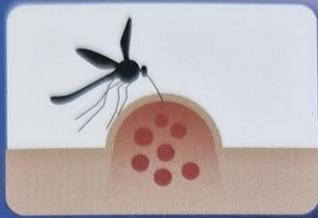

**Schmerzlinderung
nach dem Insektenstich**
Pain relief after insect bites



(01)06926408711239
(11)241209
(10)24100030

BITE GONE INSEKTEN- STICHHEILER BITE GONE INSECT BITE HEALER




EINSCHALTEN
UND AKTIVIEREN
SWITCH ON
AND ACTIVATION

Modus 1



Modus 2

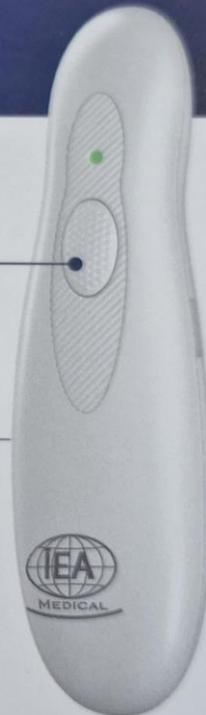

INHALT /CONTENT

1x Bite Gone Insektenstichheiler
EN: 1x Bite Gone Insect bite healer

1x Gebrauchsanweisung
EN: 1x Instruction manual

1 x USB-C Kabel (Inklusive)
EN: 1x USB-C cable (included)

Betriebsbedingungen:

10°C bis 40°C, RH (Relative Luftfeuchtigkeit) 30% - 75%; 700hPa-1060hPa

Lagerbedingungen: -10°C bis 55°C, RH (Relative Luftfeuchtigkeit) 10% - 90%; 700hPa-1060hPa

Operating conditions:

10°C to 40°C, RH (Relative Humidity) 30% - 75%; 700hPa-1060hPa

Storage conditions: - 10°C to 55°C, RH (Relative Humidity) 10% - 90%; 700hPa-1060hPa

Maximale Temperatur: 51°C ± 2°C

Programm 1: 3 Sekunden / 51°C (LED leuchtet blau)

Programm 2: 6 Sekunden / 51°C (LED leuchtet lila)











**Tasche für
Insektenstichheiler**

Passend für das Modell CH3000



 IEA International Trading GmbH
Grünwälder Straße 61
81547 München
Deutschland
Mail: service@iea-medical.com
Web: www.iea-medical.com

 DONGGUAN ZHISHANG BAGS PRODUCTS CO. LTD.
#11, LANE 7, LIANHAOXIAOJIAO 1 AREA
WANJIANG DISTRICT, DONGGUAN, CHINA
Mail: service_shuoruibag@163.com

