

## IEA Medical Teststreifen für Blutzuckermessgerät

### Anwendung:


- **Vorbereitung:** Teststreifen in das Blutzuckermessgerät einsetzen. Gerät schaltet sich automatisch ein.
- **Probenentnahme:** Finger stechen, den ersten Blutstropfen abwischen und den zweiten Tropfen auf die Sammelzone des Teststreifens auftragen.
- **Messung:** Gerät beginnt automatisch mit der Messung, das Ergebnis erscheint nach 5 Sekunden.
- **Nach der Nutzung:** Teststreifen auswerfen und ordnungsgemäß entsorgen.

### Warnhinweise:

- Teststreifen nur einmal verwenden und innerhalb von 90 Tagen nach Öffnen des Behälters aufbrauchen.
- Streifen nicht schneiden, biegen oder mit nassen Händen berühren.
- Teststreifenbehälter von Kindern fernhalten; enthalten chemische Substanzen, die schädlich sein können.
- Gerät und Streifen bei 4 °C bis 40 °C lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Ungewöhnliche Testergebnisse oder Symptome unverzüglich mit einem Arzt abklären.

### Kontakt-Hersteller:

- [lilian@acemed.com.tw](mailto:lilian@acemed.com.tw)

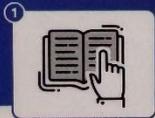

DE: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.  
EN: Read the instructions in the packing box carefully before using this product.



DE: Die Teststreifen sind auf das IEA Medical Blutzuckermessgerät AM10 abgestimmt.  
EN: The test strips are matched to the IEA Medical AM10 blood glucose meter.



DE: Bitte vergewissern Sie sich, dass der Kalibrierungscode auf dem Teststreifenbehälter mit dem auf dem Bildschirm angezeigten Code übereinstimmt.  
EN: Please confirm that the calibration code on the test strip bottle matched that displayed on the screen.



# BLUTZUCKER-TESTSTREIFEN

BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS

50

STÜCK/PIECES

-  **HANDLICHE GRÖßE**  
EN: CONVENIENT SIZE
-  **SOFORT EINSATZBEREIT**  
EN: READY FOR IMMEDIATE USE
-  **GENAUE MESSUNG**  
EN: ACCURATE MEASUREMENT
-  **SCHNELLES ERGEBNIS**  
EN: FAST RESULT
-  **BENUTZERFREUNDLICH**  
EN: USER FRIENDLY
-  **HYGIENISCHER EINMALGEBRAUCH**  
EN: HYGIENIC SINGLE USE



CE 0123 Model: AMG001



(01)04260764170906  
(11)240329  
(17)250928  
(10)001DG240301



4 260764 170906



 2024.03.29

 2025.09.28

**REF**

**LOT** 001DG240301

**MD**

**IVD**



 TEMPERATURGRENZE (4 BIS 30°C)



# BLUTZUCKER- TESTSTREIFEN

BLOOD GLUCOSE TEST STRIPS



**IEA International Trading GmbH**

Grünwalder Straße 61,  
81547 München, Deutschland

Web: [www.iea-medical.com](http://www.iea-medical.com)  
Mail: [service@iea-medical.com](mailto:service@iea-medical.com)



**MedNet EC-REP GmbH**

Borkstraße 10,  
48163 Münster, Deutschland



**Ace Medical Technology Co., Ltd.**  
No. 52, Dinghu Rd., 33378 Guishan Dist.,  
Taoyuan City, Taiwan