

IEA Medical Medikamentenbox

Anwendung:

- **Befüllen:** Tagesdosierer seitlich aus dem Magazin schieben und die Fächer (morgens, mittags, abends, nachts) mit den erforderlichen Medikamenten füllen.
- **Entnahme:** Deckel des Tagesdosierers entsprechend der Zeit öffnen und Medikamente entnehmen. Deckel schließen und Dosierer ins Magazin zurückschieben.
- **Reinigung:** Tagesdosierer leeren, Deckel entfernen und alle Teile reinigen. Nach vollständigem Trocknen wieder befüllen und einsetzen.

Warnhinweise:

- Vor Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung schützen.
- Nur vollständig getrocknete Teile wiederverwenden.
- Nicht benutzen, wenn Teile beschädigt oder geöffnet sind.

IEA Medical Tablettenzerteiler

Anwendung:

- **Vorbereitung:** Tablette in die vorgesehene Halterung des Zerteilers legen.
- **Zerteilen:** Deckel des Zerteilers schließen und fest herunterdrücken, um die Tablette zu teilen.
- **Nach der Nutzung:** Zerteilte Tablette entnehmen und Rückstände aus dem Zerteiler entfernen.

Warnhinweise:

- Nur für geeignete Tabletten verwenden; ungeeignet für beschichtete, zu harte oder ungeeignete Tablettenformen.
- Zerteiler von Kindern fernhalten, um Verletzungen zu vermeiden.
- Nach jeder Nutzung reinigen, um Rückstände zu entfernen und Kreuzkontamination zu verhindern.

Kontakt-Hersteller:

- leslie@nb-bluesky.com

TABLETTENZERTTEILER UND MEDIKAMENTENBOX

PILL CUTTER AND MEDICATION BOX
SÉPARATEUR DE PILULES ET BOTTE À MÉDICAMENTS
PASTILLERO Y CAJA DE MEDICAMENTOS
DIVISORIO PER PILLOLE





TABLETTENZERTEILER UND MEDIKAMENTENBOX

PILL CUTTER AND MEDICATION BOX
SÉPARATEUR DE PILULES ET BOÎTE À MÉDICAMENTS
PASTILLERO Y CAJA DE MEDICAMENTOS
DIVISORIO PER PILLOLE



20240620
LOT 24060001
MD



IEA International Trading GmbH
Grünwalder Straße 61,
81547 München, Deutschland
Web: www.iea-medical.com
Mail: service@iea-medical.com



Wellkang Ltd
Enterprise Hub, NW Business Complex,
1 Beraghmore Rd, Derry, BT48 8SE,
Northern Ireland, United Kingdom



**Ningbo High-Tech Bluesky
Manufactory & Trading Co., Ltd.**
Rm201, Building B,
Hongtai Plaza
No.55 Haiyan North Rd
Ningbo 315042, China



4 260764 170951



TABLETTENZERTEILER UND MEDIKAMENTENBOX

PILL CUTTER AND MEDICATION BOX
SÉPARATEUR DE PILULES ET BOÎTE À MÉDICAMENTS
PASTILLERO Y CAJA DE MEDICAMENTOS
DIVISORIO PER PILLOLE



20240620
24060001

LOT
MD

**SICHERES MATERIAL**

EN : Safe material
FR : Matériel sûr
ES : Material seguro
IT : Materiale sicuro

**DOPPELTER SCHUTZ**

EN : Double protection
FR : Double protection
ES : Doble protección
IT : Doppia protezione

**PRODUKTE IN KOMBINATION/SET**

EN : Products in combination/set
FR : Produits en combinaison/set
ES : Productos en combinación/set
IT : Prodotti in combinazione/set

**STABILITÄT**

EN : Stability
FR : Stabilité
ES : Estabilidad
IT : Stabilità

**HANDLICHE GRÖßE**

EN : Handy size
FR : Taille pratique
ES : Tamaño manejable
IT : Formato pratico

**SOFORT EINSATZBEREIT**

EN : Ready for immediate use
FR : Immédiatement prêt à l'emploi
ES : Listo para su uso inmediato
IT : Pronti per l'uso immediato

**EINFACHE & KLARE SORTIERUNG**

EN : Simple and clear sorting
FR : Tri simple et clair
ES : Clasificación sencilla y clara
IT : Ordinamento semplice e chiaro